



Чистящая пленка AGFA Roller Transport Cleanup Film

- Специальная двухсторонняя чистящая пленка с желатиновым слоем.
- Пленка используется для чистки проявочных процессов
- Позволяет за один проход удалить с транспортирующих валков секций проявки, фиксирования, промывки и сушки всю грязь.
- Процесс очистки происходит без разборки процессора и без использования химикатов.
- Сокращает время, необходимое для очистки и обслуживания машины.
- Время очистки занимает максимум 5 минут.
- Удобство в использовании.



Использование чистящей пленки AGFA Roller Transport Cleanup Film

1. Введите лист чистящей пленки в процессор.
2. Проследите чтобы пленка прошла через транспортирующие валки всех секций (проявка, фиксирование, промывка и сушка).
3. Если чистящая пленка вышла очень грязная, повторить процесс еще раз с новым листом.

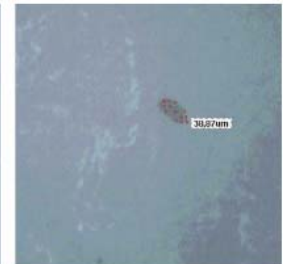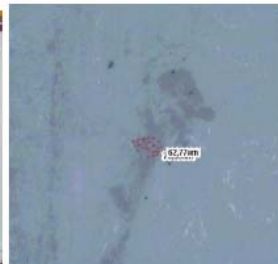

Упаковка

Кат № EQO1X чистящая пленка AGFA Roller Transport Cleanup Film
Упаковка 27,9см x 40,6см x50листов